

Nutec Global Indústria e Comércio Ltda – CNPJ: 07.575.813/0001-59

Avenida 52A, 771 – Vila Alemã – Rio Claro/SP | Responsável Técnico: Wellinton Camargo, CREA/SP: 5070992639

De acordo com a IN nº4/2012 estabelecida pela Anvisa, a Instrução de uso é disponibilizada no site da Nutec Global (www.nutecglobal.com.br) e Anvisa, em caso de dúvidas ou para obtenção da instrução de uso em formato impresso (quando necessário) e sem custo adicional entrar em contato através do telefone +55 19 3536-3535 ou pelo e-mail comercial@nutecglobal.tech.

Instrução de Uso

Cânula de Debridação Nutec Microartro

Registro Anvisa nº 81715689010 – Revisão 01

1. Características do produto

Nome técnico: Cânulas

Nome comercial: Cânula de Debridação Nutec Microartro

Classe de Risco: II

Produto Estéril – Esterilizado por Óxido de Etileno – ETO

Validade de 02 anos a partir da data de fabricação

Produto de uso único - PROIBIDO REPROCESSAR

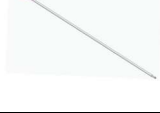
2. Características técnicas

Imagem Ilustrativa	Código	Descrição	Componentes	Função	Dimensão
	N000.AA0.001	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 80 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x139,3mm
	N000.AA0.002	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 80 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x135,5mm
	N000.AA0.003	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 80 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x135,5mm
	N000.AA0.004	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 80 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x139,3mm

			Poliacetel (ABNT NBR 15804).	remover ossos e tecidos.	
	N000.AA0.005	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 80 ATK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetel (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x131,2mm
	N000.AA0.006	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 80 STF	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetel (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x132,7mm
	N000.AA0.007	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 80 BMT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetel (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x126,5mm
	N000.AA0.009	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 80 RZM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetel (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x127,2mm
	N000.AA0.010	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 80 SSJ	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetel (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x127,8mm
	N000.AA0.011	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 80 MLV	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetel (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x135,2mm
	N000.AB0.001	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 80 LVT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetel (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x139,3mm
	N000.AB0.002	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 80 RZK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetel (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x135,5mm
	N000.AB0.003	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 80 DYP	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetel (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x135,5mm
	N000.AB0.004	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 80 STM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetel (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x139,3mm
	N000.AB0.005	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 80 ATK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetel (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x131,2mm

	N000.AB0.006	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 80 STF	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x132,7mm
	N000.AB0.007	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 80 BMT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x126,5mm
	N000.AB0.009	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 80 RZM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x127,2mm
	N000.AB0.010	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 80 SSJ	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x127,8mm
	N000.AB0.011	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 80 MLV	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x135,2mm
	N000.AA1.001	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 80 LVT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x139,3mm
	N000.AA1.002	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 80 RZK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x135,5mm
	N000.AA1.003	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 80 DYP	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x135,5mm
	N000.AA1.004	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 80 STM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x139,3mm
	N000.AA1.005	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 80 ATK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x131,2mm
	N000.AA1.006	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 80 STF	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x132,7mm
	N000.AA1.007	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 80 BMT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x126,5mm

	N000.AA1.009	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 80 RZM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x127,2mm
	N000.AA1.010	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 80 SSJ	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x127,8mm
	N000.AA1.011	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 80 MLV	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x135,2mm
	N000.AB1.001	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 80 LVT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x139,3mm
	N000.AB1.002	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 80 RZK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x135,5mm
	N000.AB1.003	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 80 DYP	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x135,5mm
	N000.AB1.004	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 80 STM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x139,3mm
	N000.AB1.005	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 80 ATK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x131,2mm
	N000.AB1.006	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 80 STF	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x132,7mm
	N000.AB1.007	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 80 BMT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x126,5mm
	N000.AB1.009	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 80 RZM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x127,2mm
	N000.AB1.010	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 80 SSJ	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x127,8mm

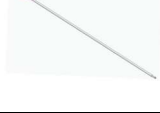
	N000.AB1.011	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 80 MLV	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x135,2mm
	N000.AA2.001	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 80 LVT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x139,3mm
	N000.AA2.002	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 80 RZK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x135,5mm
	N000.AA2.003	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 80 DYP	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x135,5mm
	N000.AA2.004	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 80 STM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x139,3mm
	N000.AA2.005	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 80 ATK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x131,2mm
	N000.AA2.006	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 80 STF	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x132,7mm
	N000.AA2.007	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 80 BMT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x126,5mm
	N000.AA2.009	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 80 RZM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x127,2mm
	N000.AA2.010	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 80 SSJ	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x127,8mm
	N000.AA2.011	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 80 MLV	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x135,2mm
	N000.AB2.001	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 80 LVT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x139,3mm

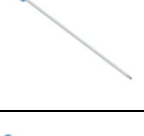
	N000.AB2.002	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 80 RZK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x135,5mm
	N000.AB2.003	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 80 DYP	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x135,5mm
	N000.AB2.004	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 80 STM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x139,3mm
	N000.AB2.005	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 80 ATK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x131,2mm
	N000.AB2.006	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 80 STF	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x132,7mm
	N000.AB2.007	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 80 BMT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x126,5mm
	N000.AB2.009	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 80 RZM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x127,2mm
	N000.AB2.010	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 80 SSJ	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x127,8mm
	N000.AB2.011	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 80 MLV	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x135,2mm
	N000.AC2.001	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 80 LVT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x140,8mm
	N000.AC2.002	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 80 RZK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x137,0mm
	N000.AC2.003	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 80 DYP	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x137,0mm

	N000.AC2.004	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 80 STM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x140,8mm
	N000.AC2.005	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 80 ATK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x132,7mm
	N000.AC2.006	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 80 STF	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x134,2mm
	N000.AC2.007	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 80 BMT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x128,0mm
	N000.AC2.009	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 80 RZM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x128,7mm
	N000.AC2.010	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 80 SSJ	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x129,3mm
	N000.AC2.011	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 80 MLV	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x136,7mm
	N000.AD2.001	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 80 LVT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x140,8mm
	N000.AD2.002	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 80 RZK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x137,0mm
	N000.AD2.003	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 80 DYP	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x137,0mm
	N000.AD2.004	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 80 STM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x140,8mm
	N000.AD2.005	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 80 ATK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x132,7mm

	N000.AD2.006	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 80 STF	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x134,2mm
	N000.AD2.007	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 80 BMT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x128,0mm
	N000.AD2.009	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 80 RZM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x128,7mm
	N000.AD2.010	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 80 SSJ	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x129,3mm
	N000.AD2.011	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 80 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x136,7mm
	N000.AE2.001	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 80 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x140,8mm
	N000.AE2.002	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 80 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x137,0mm
	N000.AE2.003	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 80 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x137,0mm
	N000.AE2.004	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 80 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x140,8mm
	N000.AE2.005	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 80 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x132,7mm
	N000.AE2.006	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 80 STF	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x134,2mm
	N000.AE2.007	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 80 BMT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x128,0mm

	N000.AE2.009	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 80 RZM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x128,7mm
	N000.AE2.010	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 80 SSJ	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x129,3mm
	N000.AE2.011	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 80 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x136,7mm
	N000.AA3.001	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 80 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x139,3mm
	N000.AA3.002	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 80 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x135,5mm
	N000.AA3.003	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 80 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x135,5mm
	N000.AA3.004	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 80 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x139,3mm
	N000.AA3.005	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 80 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x131,2mm
	N000.AA3.006	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 80 STF	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x132,7mm
	N000.AA3.007	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 80 BMT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x126,5mm
	N000.AA3.009	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 80 RZM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x127,2mm
	N000.AA3.010	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 80 SSJ	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x127,8mm

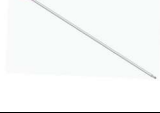
	N000.AA3.011	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 80 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x135,2mm
	N000.AB3.001	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 80 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x139,3mm
	N000.AB3.002	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 80 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x135,5mm
	N000.AB3.003	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 80 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x135,5mm
	N000.AB3.004	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 80 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x139,3mm
	N000.AB3.005	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 80 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x131,2mm
	N000.AB3.006	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 80 STF	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x132,7mm
	N000.AB3.007	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 80 BMT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x126,5mm
	N000.AB3.009	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 80 RZM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x127,2mm
	N000.AB3.010	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 80 SSJ	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x127,8mm
	N000.AB3.011	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 80 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x135,2mm
	N000.AC3.001	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BAEL 4,5 X 80 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x140,8mm

	N000.AC3.002	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 80 RZK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x137,0mm
	N000.AC3.003	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 80 DYP	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x137,0mm
	N000.AC3.004	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 80 STM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x140,8mm
	N000.AC3.005	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 80 ATK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x132,7mm
	N000.AC3.006	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 80 STF	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x134,2mm
	N000.AC3.007	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 80 BMT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x128,0mm
	N000.AC3.009	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 80 RZM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x128,7mm
	N000.AC3.010	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 80 SSJ	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x129,3mm
	N000.AC3.011	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 80 MLV	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x136,7mm
	N000.AD3.001	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 80 LVT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x140,8mm
	N000.AD3.002	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 80 RZK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x137,0mm
	N000.AD3.003	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 80 DYP	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x137,0mm

	N000.AD3.004	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 80 STM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x140,8mm
	N000.AD3.005	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 80 ATK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x132,7mm
	N000.AD3.006	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 80 STF	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x134,2mm
	N000.AD3.007	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 80 BMT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x128,0mm
	N000.AD3.009	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 80 RZM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x128,7mm
	N000.AD3.010	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 80 SSJ	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x129,3mm
	N000.AD3.011	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 80 MLV	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x136,7mm
	N000.AE3.001	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 80 LVT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x140,8mm
	N000.AE3.002	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 80 RZK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x137,0mm
	N000.AE3.003	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 80 DYP	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x137,0mm
	N000.AE3.004	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 80 STM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x140,8mm
	N000.AE3.005	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 80 ATK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x132,7mm

	N000.AE3.006	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 80 STF	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x134,2mm
	N000.AE3.007	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 80 BMT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x128,0mm
	N000.AE3.009	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 80 RZM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x128,7mm
	N000.AE3.010	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 80 SSJ	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x129,3mm
	N000.AE3.011	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 80 MLV	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x136,7mm
	N000.AA0.101	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 115 LVT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x174,3mm
	N000.AA0.102	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 115 RZK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x170,5mm
	N000.AA0.103	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 115 DYP	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x170,5mm
	N000.AA0.104	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 115 STM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x174,3mm
	N000.AA0.105	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 115 ATK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x166,2mm
	N000.AA0.106	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 115 STF	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x167,7mm
	N000.AA0.107	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 115 BMT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x161,5mm

	N000.AA0.109	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 115 RZM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x162,2mm
	N000.AA0.110	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 115 SSJ	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x162,8mm
	N000.AA0.111	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 115 MLV	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x170,2mm
	N000.AB0.101	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 115 LVT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x174,3mm
	N000.AB0.102	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 115 RZK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x170,5mm
	N000.AB0.103	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 115 DYP	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x170,5mm
	N000.AB0.104	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 115 STM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x174,3mm
	N000.AB0.105	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 115 ATK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x166,2mm
	N000.AB0.106	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 115 STF	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x167,7mm
	N000.AB0.107	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 115 BMT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x161,5mm
	N000.AB0.109	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 115 RZM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x162,2mm
	N000.AB0.110	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 115 SSJ	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x162,8mm

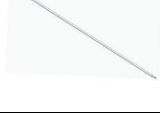
	N000.AB0.111	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 115 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x170,2mm
	N000.AA1.101	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 115 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x174,3mm
	N000.AA1.102	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 115 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x170,5mm
	N000.AA1.103	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 115 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x170,5mm
	N000.AA1.104	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 115 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x174,3mm
	N000.AA1.105	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 115 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x166,2mm
	N000.AA1.106	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 115 STF	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x167,7mm
	N000.AA1.107	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 115 BMT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x161,5mm
	N000.AA1.109	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 115 RZM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x162,2mm
	N000.AA1.110	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 115 SSJ	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x162,8mm
	N000.AA1.111	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 115 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x170,2mm
	N000.AB1.101	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 115 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x174,3mm

	N000.AB1.102	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 115 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x170,5mm
	N000.AB1.103	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 115 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x170,5mm
	N000.AB1.104	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 115 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x174,3mm
	N000.AB1.105	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 115 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x166,2mm
	N000.AB1.106	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 115 STF	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x167,7mm
	N000.AB1.107	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 115 BMT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x161,5mm
	N000.AB1.109	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 115 RZM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x162,2mm
	N000.AB1.110	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 115 SSJ	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x162,8mm
	N000.AB1.111	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 115 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x170,2mm
	N000.AA2.101	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 115 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x174,3mm
	N000.AA2.102	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 115 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x170,5mm
	N000.AA2.103	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 115 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x170,5mm

	N000.AA2.104	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 115 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x174,3mm
	N000.AA2.105	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 115 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x166,2mm
	N000.AA2.106	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 115 STF	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x167,7mm
	N000.AA2.107	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 115 BMT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x161,5mm
	N000.AA2.109	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 115 RZM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x162,2mm
	N000.AA2.110	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 115 SSJ	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x162,8mm
	N000.AA2.111	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 115 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x170,2mm
	N000.AB2.101	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 115 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x174,3mm
	N000.AB2.102	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 115 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x170,5mm
	N000.AB2.103	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 115 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x170,5mm
	N000.AB2.104	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 115 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x174,3mm
	N000.AB2.105	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 115 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x166,2mm

	N000.AB2.106	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 115 STF	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x167,7mm
	N000.AB2.107	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 115 BMT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x161,5mm
	N000.AB2.109	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 115 RZM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x162,2mm
	N000.AB2.110	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 115 SSJ	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x162,8mm
	N000.AB2.111	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 115 MLV	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x170,2mm
	N000.AC2.101	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 115 LVT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x175,8mm
	N000.AC2.102	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 115 RZK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x172,0mm
	N000.AC2.103	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 115 DYP	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x172,0mm
	N000.AC2.104	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 115 STM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x175,8mm
	N000.AC2.105	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 115 ATK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x167,7mm
	N000.AC2.106	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 115 STF	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x169,2mm
	N000.AC2.107	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 115 BMT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x163,0mm

	N000.AC2.109	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 115 RZM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x163,7mm
	N000.AC2.110	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 115 SSJ	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x164,3mm
	N000.AC2.120	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 115 MST	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x171,7mm
	N000.AD2.101	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 115 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x175,8mm
	N000.AD2.102	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 115 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x172,0mm
	N000.AD2.103	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 115 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x172,0mm
	N000.AD2.104	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 115 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x175,8mm
	N000.AD2.105	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 115 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x167,7mm
	N000.AD2.106	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 115 STF	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x169,2mm
	N000.AD2.107	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 115 BMT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x163,0mm
	N000.AD2.109	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 115 RZM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x163,7mm
	N000.AD2.110	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 115 SSJ	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x164,3mm

	N000.AD2.111	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 115 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x171,7mm
	N000.AE2.101	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 115 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x175,8mm
	N000.AE2.102	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 115 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x172,0mm
	N000.AE2.103	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 115 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x172,0mm
	N000.AE2.104	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 115 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x175,8mm
	N000.AE2.105	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 115 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x167,7mm
	N000.AE2.106	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 115 STF	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x169,2mm
	N000.AE2.107	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 115 BMT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x163,0mm
	N000.AE2.109	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 115 RZM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x163,7mm
	N000.AE2.110	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 115 SSI	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x164,3mm
	N000.AE2.111	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 115 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x171,7mm
	N000.AA3.101	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 115 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x174,3mm

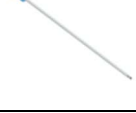
	N000.AA3.102	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 115 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x170,5mm
	N000.AA3.103	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 115 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x170,5mm
	N000.AA3.104	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 115 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x174,3mm
	N000.AA3.105	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 115 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x166,2mm
	N000.AA3.106	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 115 STF	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x167,7mm
	N000.AA3.107	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 115 BMT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x161,5mm
	N000.AA3.109	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 115 RZM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x162,2mm
	N000.AA3.110	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 115 SSI	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x162,8mm
	N000.AA3.111	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 115 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x170,2mm
	N000.AB3.101	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 115 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x174,3mm
	N000.AB3.102	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 115 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x170,5mm
	N000.AB3.103	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 115 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x170,5mm

	N000.AB3.104	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 115 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x174,3mm
	N000.AB3.105	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 115 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x166,2mm
	N000.AB3.106	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 115 STF	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x167,7mm
	N000.AB3.107	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 115 BMT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x161,5mm
	N000.AB3.109	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 115 RZM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x162,2mm
	N000.AB3.110	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 115 SSJ	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x162,8mm
	N000.AB3.111	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 115 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x170,2mm
	N000.AC3.101	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 115 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x175,8mm
	N000.AC3.102	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 115 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x172,0mm
	N000.AC3.103	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 115 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x172,0mm
	N000.AC3.104	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 115 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x175,8mm
	N000.AC3.105	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 115 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x167,7mm

	N000.AC3.106	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BA CL 4,5 X 115 STF	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x169,2mm
	N000.AC3.107	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BA CL 4,5 X 115 BMT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x163,0mm
	N000.AC3.109	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BA CL 4,5 X 115 RZM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x163,7mm
	N000.AC3.110	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BA CL 4,5 X 115 SSJ	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x164,3mm
	N000.AC3.111	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BA CL 4,5 X 115 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x171,7mm
	N000.AD3.101	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BO CL 4,5 X 115 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x175,8mm
	N000.AD3.102	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BO CL 4,5 X 115 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x172,0mm
	N000.AD3.103	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BO CL 4,5 X 115 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x172,0mm
	N000.AD3.104	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BO CL 4,5 X 115 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x175,8mm
	N000.AD3.105	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BO CL 4,5 X 115 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x167,7mm
	N000.AD3.106	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BO CL 4,5 X 115 STF	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x169,2mm
	N000.AD3.107	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BO CL 4,5 X 115 BMT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x163,0mm

	N000.AD3.109	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 115 RZM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x163,7mm
	N000.AD3.110	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 115 SSJ	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x164,3mm
	N000.AD3.111	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 115 MLV	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x171,7mm
	N000.AE3.101	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 115 LVT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x175,8mm
	N000.AE3.102	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 115 RZK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x172,0mm
	N000.AE3.103	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 115 DYP	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x172,0mm
	N000.AE3.104	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 115 STM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x175,8mm
	N000.AE3.105	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 115 ATK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x167,7mm
	N000.AE3.106	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 115 STF	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x169,2mm
	N000.AE3.107	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 115 BMT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x163,0mm
	N000.AE3.109	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 115 RZM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x163,7mm
	N000.AE3.110	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 115 SSJ	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x164,3mm

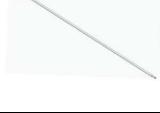
	N000.AE3.111	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 115 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x171,7mm
	N000.AA0.201	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 150 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x209,3mm
	N000.AA0.202	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 150 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x205,5mm
	N000.AA0.203	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 150 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x205,5mm
	N000.AA0.204	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 150 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x209,3mm
	N000.AA0.205	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 150 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x201,2mm
	N000.AA0.206	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 150 STF	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x202,7mm
	N000.AA0.207	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 150 BMT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x196,5mm
	N000.AA0.209	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 150 RZM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x197,2mm
	N000.AA0.210	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 150 SSJ	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x197,8mm
	N000.AA0.211	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 150 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x205,2mm
	N000.AB0.201	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 150 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x209,3mm

	N000.AB0.202	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 150 RZK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x205,5mm
	N000.AB0.203	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 150 DYP	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x205,5mm
	N000.AB0.204	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 150 STM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x209,3mm
	N000.AB0.205	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 150 ATK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x201,2mm
	N000.AB0.206	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 150 STF	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x202,7mm
	N000.AB0.207	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 150 BMT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x196,5mm
	N000.AB0.209	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 150 RZM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x197,2mm
	N000.AB0.210	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 150 SSJ	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x197,8mm
	N000.AB0.211	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 150 MLV	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x205,2mm
	N000.AA1.201	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 150 LVT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x209,3mm
	N000.AA1.202	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 150 RZK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x205,5mm
	N000.AA1.203	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 150 DYP	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x205,5mm

	N000.AA1.204	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 150 STM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x209,3mm
	N000.AA1.205	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 150 ATK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x201,2mm
	N000.AA1.206	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 150 STF	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x202,7mm
	N000.AA1.207	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 150 BMT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x196,5mm
	N000.AA1.209	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 150 RZM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x197,2mm
	N000.AA1.210	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 150 SSI	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x197,8mm
	N000.AA1.211	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 150 MLV	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x205,2mm
	N000.AB1.201	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 150 LVT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x209,3mm
	N000.AB1.202	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 150 RZK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x205,5mm
	N000.AB1.203	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 150 DYP	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x205,5mm
	N000.AB1.204	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 150 STM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x209,3mm
	N000.AB1.205	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 150 ATK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x201,2mm

	N000.AB1.206	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 150 STF	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x202,7mm
	N000.AB1.207	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 150 BMT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x196,5mm
	N000.AB1.209	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 150 RZM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x197,2mm
	N000.AB1.210	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 150 SSJ	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x197,8mm
	N000.AB1.211	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 150 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x205,2mm
	N000.AA2.201	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 150 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x209,3mm
	N000.AA2.202	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 150 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x205,5mm
	N000.AA2.203	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 150 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x205,5mm
	N000.AA2.204	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 150 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x209,3mm
	N000.AA2.205	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 150 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x201,2mm
	N000.AA2.206	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 150 STF	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x202,7mm
	N000.AA2.207	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 150 BMT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x196,5mm

	N000.AA2.209	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 150 RZM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x197,2mm
	N000.AA2.210	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 150 SSJ	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x197,8mm
	N000.AA2.211	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 150 MLV	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x205,2mm
	N000.AB2.201	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 150 LVT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x209,3mm
	N000.AB2.202	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 150 RZK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x205,5mm
	N000.AB2.203	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 150 DYP	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x205,5mm
	N000.AB2.204	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 150 STM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x209,3mm
	N000.AB2.205	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 150 ATK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x201,2mm
	N000.AB2.206	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 150 STF	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x202,7mm
	N000.AB2.207	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 150 BMT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x196,5mm
	N000.AB2.209	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 150 RZM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x197,2mm
	N000.AB2.210	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 150 SSJ	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x197,8mm

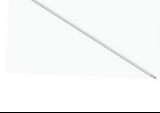
	N000.AB2.211	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 150 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x205,2mm
	N000.AC2.201	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 150 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x210,8mm
	N000.AC2.202	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 150 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x207,0mm
	N000.AC2.203	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 150 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x207,0mm
	N000.AC2.204	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 150 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x210,8mm
	N000.AC2.205	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 150 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x202,7mm
	N000.AC2.206	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 150 STF	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x204,2mm
	N000.AC2.207	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 150 BMT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x198,0mm
	N000.AC2.209	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 150 RZM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x198,7mm
	N000.AC2.210	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 150 SSI	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x199,3mm
	N000.AC2.211	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 150 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x206,7mm
	N000.AD2.201	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 150 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x210,8mm

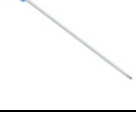
	N000.AD2.202	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 150 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x207,0mm
	N000.AD2.203	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 150 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x207,0mm
	N000.AD2.204	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 150 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x210,8mm
	N000.AD2.205	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 150 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x202,7mm
	N000.AD2.206	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 150 STF	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x204,2mm
	N000.AD2.207	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 150 BMT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x198,0mm
	N000.AD2.209	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 150 RZM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x198,7mm
	N000.AD2.210	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 150 SSI	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x199,3mm
	N000.AD2.211	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 150 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x206,7mm
	N000.AE2.201	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 150 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x210,8mm
	N000.AE2.202	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 150 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x207,0mm
	N000.AE2.203	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 150 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x207,0mm

	N000.AE2.204	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 150 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x210,8mm
	N000.AE2.205	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 150 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x202,7mm
	N000.AE2.206	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 150 STF	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x204,2mm
	N000.AE2.207	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 150 BMT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x198,0mm
	N000.AE2.209	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 150 RZM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x198,7mm
	N000.AE2.210	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 150 SSI	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x199,3mm
	N000.AE2.211	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 150 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x206,7mm
	N000.AA3.201	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 150 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x209,3mm
	N000.AA3.202	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 150 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x205,5mm
	N000.AA3.203	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 150 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x205,5mm
	N000.AA3.204	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 150 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x209,3mm
	N000.AA3.205	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 150 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x201,2mm

	N000.AA3.206	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 150 STF	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x202,7mm
	N000.AA3.207	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 150 BMT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x196,5mm
	N000.AA3.209	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 150 RZM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x197,2mm
	N000.AA3.210	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 150 SSJ	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x197,8mm
	N000.AA3.211	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 150 MLV	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x205,2mm
	N000.AB3.201	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 150 LVT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x209,3mm
	N000.AB3.202	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 150 RZK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x205,5mm
	N000.AB3.203	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 150 DYP	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x205,5mm
	N000.AB3.204	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 150 STM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x209,3mm
	N000.AB3.205	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 150 ATK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x201,2mm
	N000.AB3.206	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 150 STF	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x202,7mm
	N000.AB3.207	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 150 BMT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x196,5mm

	N000.AB3.209	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 150 RZM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x197,2mm
	N000.AB3.210	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 150 SSJ	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x197,8mm
	N000.AB3.211	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 150 MLV	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x205,2mm
	N000.AC3.201	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 150 LVT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x210,8mm
	N000.AC3.202	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 150 RZK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x207,0mm
	N000.AC3.203	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 150 DYP	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x207,0mm
	N000.AC3.204	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 150 STM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x210,8mm
	N000.AC3.205	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 150 ATK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x202,7mm
	N000.AC3.206	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 150 STF	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x204,2mm
	N000.AC3.207	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 150 BMT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x198,0mm
	N000.AC3.209	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 150 RZM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x198,7mm
	N000.AC3.210	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 150 SSJ	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x199,3mm

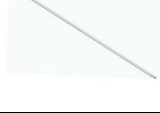
	N000.AC3.211	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 150 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x206,7mm
	N000.AD3.201	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 150 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x210,8mm
	N000.AD3.202	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 150 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x207,0mm
	N000.AD3.203	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 150 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x207,0mm
	N000.AD3.204	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 150 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x210,8mm
	N000.AD3.205	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 150 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x202,7mm
	N000.AD3.206	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 150 STF	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x204,2mm
	N000.AD3.207	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 150 BMT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x198,0mm
	N000.AD3.209	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 150 RZM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x198,7mm
	N000.AD3.210	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 150 SSI	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x199,3mm
	N000.AD3.211	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 150 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x206,7mm
	N000.AE3.201	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 150 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x210,8mm

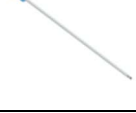
	N000.AE3.202	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 150 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x207,0mm
	N000.AE3.203	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 150 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x207,0mm
	N000.AE3.204	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 150 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x210,8mm
	N000.AE3.205	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 150 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x202,7mm
	N000.AE3.206	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 150 STF	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x204,2mm
	N000.AE3.207	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 150 BMT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x198,0mm
	N000.AE3.209	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 150 RZM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x198,7mm
	N000.AE3.210	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 150 SSI	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x199,3mm
	N000.AE3.211	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 150 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x206,7mm
	N000.AA0.301	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 190 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x249,3mm
	N000.AA0.302	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 190 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x245,5mm
	N000.AA0.303	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 190 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x245,5mm

	N000.AA0.304	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 190 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x249,3mm
	N000.AA0.305	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 190 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x241,2mm
	N000.AA0.306	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 190 STF	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x242,7mm
	N000.AA0.307	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 190 BMT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x236,5mm
	N000.AA0.309	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 190 RZM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x237,2mm
	N000.AA0.310	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 190 SSJ	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x237,8mm
	N000.AA0.311	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 2,5 X 190 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x245,2mm
	N000.AB0.301	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 190 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x249,3mm
	N000.AB0.302	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 190 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x245,5mm
	N000.AB0.303	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 190 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x245,5mm
	N000.AB0.304	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 190 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x249,3mm
	N000.AB0.305	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 190 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x241,2mm

	N000.AB0.306	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 190 STF	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x242,7mm
	N000.AB0.307	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 190 BMT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x236,5mm
	N000.AB0.309	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 190 RZM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x237,2mm
	N000.AB0.310	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 190 SSJ	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x237,8mm
	N000.AB0.311	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 2,5 X 190 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x245,2mm
	N000.AA1.301	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 190 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x249,3mm
	N000.AA1.302	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 190 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x245,5mm
	N000.AA1.303	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 190 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x245,5mm
	N000.AA1.304	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 190 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x249,3mm
	N000.AA1.305	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 190 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x241,2mm
	N000.AA1.306	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 190 STF	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x242,7mm
	N000.AA1.307	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 190 BMT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x236,5mm

	N000.AA1.309	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 190 RZM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x237,2mm
	N000.AA1.310	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 190 SSJ	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x237,8mm
	N000.AA1.311	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,0 X 190 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x245,2mm
	N000.AB1.301	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 190 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x249,3mm
	N000.AB1.302	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 190 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x245,5mm
	N000.AB1.303	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 190 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x245,5mm
	N000.AB1.304	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 190 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x249,3mm
	N000.AB1.305	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 190 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x241,2mm
	N000.AB1.306	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 190 STF	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x242,7mm
	N000.AB1.307	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 190 BMT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x236,5mm
	N000.AB1.309	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 190 RZM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x237,2mm
	N000.AB1.310	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 190 SSJ	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x237,8mm

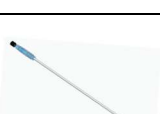
	N000.AB1.311	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,0 X 190 MLV	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x245,2mm
	N000.AA2.301	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 190 LVT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x249,3mm
	N000.AA2.302	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 190 RZK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x245,5mm
	N000.AA2.303	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 190 DYP	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x245,5mm
	N000.AA2.304	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 190 STM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x249,3mm
	N000.AA2.305	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 190 ATK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x241,2mm
	N000.AA2.306	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 190 STF	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x242,7mm
	N000.AA2.307	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 190 BMT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x236,5mm
	N000.AA2.309	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 190 RZM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x237,2mm
	N000.AA2.310	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 190 SSJ	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x237,8mm
	N000.AA2.311	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 3,5 X 190 MLV	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x245,2mm
	N000.AB2.301	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 190 LVT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x249,3mm

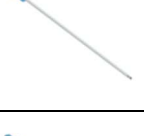
	N000.AB2.302	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 190 RZK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x245,5mm
	N000.AB2.303	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 190 DYP	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x245,5mm
	N000.AB2.304	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 190 STM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x249,3mm
	N000.AB2.305	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 190 ATK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x241,2mm
	N000.AB2.306	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 190 STF	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x242,7mm
	N000.AB2.307	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 190 BMT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x236,5mm
	N000.AB2.309	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 190 RZM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x237,2mm
	N000.AB2.310	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 190 SSJ	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x237,8mm
	N000.AB2.311	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 3,5 X 190 MLV	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x245,2mm
	N000.AC2.301	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 190 LVT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x250,8mm
	N000.AC2.302	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 190 RZK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x247,0mm
	N000.AC2.303	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 190 DYP	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x247,0mm

	N000.AC2.304	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 190 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x250,8mm
	N000.AC2.305	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 190 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x242,7mm
	N000.AC2.306	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 190 STF	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x244,2mm
	N000.AC2.307	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 190 BMT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x238,0mm
	N000.AC2.309	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 190 RZM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x238,7mm
	N000.AC2.310	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 190 SSI	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x239,3mm
	N000.AC2.311	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 3,5 X 190 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x246,7mm
	N000.AD2.301	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 190 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x250,8mm
	N000.AD2.302	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 190 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x247,0mm
	N000.AD2.303	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 190 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x247,0mm
	N000.AD2.304	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 190 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x250,8mm
	N000.AD2.305	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 190 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x242,7mm

	N000.AD2.306	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 190 STF	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x244,2mm
	N000.AD2.307	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 190 BMT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x238,0mm
	N000.AD2.309	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 190 RZM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x238,7mm
	N000.AD2.310	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 190 SSJ	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x239,3mm
	N000.AD2.311	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 3,5 X 190 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x246,7mm
	N000.AE2.301	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 190 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x250,8mm
	N000.AE2.302	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 190 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x247,0mm
	N000.AE2.303	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 190 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x247,0mm
	N000.AE2.304	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 190 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x250,8mm
	N000.AE2.305	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 190 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x242,7mm
	N000.AE2.306	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 190 STF	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x244,2mm
	N000.AE2.307	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 190 BMT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x238,0mm

	N000.AE2.309	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 190 RZM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x238,7mm
	N000.AE2.310	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 190 SSJ	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x239,3mm
	N000.AE2.311	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 3,5 X 190 MLV	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x246,7mm
	N000.AA3.301	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 190 LVT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x250,8mm
	N000.AA3.302	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 190 RZK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x247,0mm
	N000.AA3.303	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 190 DYP	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x247,0mm
	N000.AA3.304	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 190 STM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x250,8mm
	N000.AA3.305	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 190 ATK	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x242,7mm
	N000.AA3.306	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 190 STF	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x244,2mm
	N000.AA3.307	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 190 BMT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x238,0mm
	N000.AA3.309	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 190 RZM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x238,7mm
	N000.AA3.310	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 190 SSJ	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x239,3mm

	N000.AA3.311	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO CMA 4,5 X 190 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x246,7mm
	N000.AB3.301	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 190 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x250,8mm
	N000.AB3.302	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 190 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x247,0mm
	N000.AB3.303	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 190 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x247,0mm
	N000.AB3.304	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 190 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x250,8mm
	N000.AB3.305	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 190 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x242,7mm
	N000.AB3.306	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 190 STF	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x244,2mm
	N000.AB3.307	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 190 BMT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x238,0mm
	N000.AB3.309	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 190 RZM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x238,7mm
	N000.AB3.310	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 190 SSJ	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x239,3mm
	N000.AB3.311	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO APC 4,5 X 190 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x246,7mm
	N000.AC3.301	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 190 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x250,8mm

	N000.AC3.302	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 190 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x247,0mm
	N000.AC3.303	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 190 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x247,0mm
	N000.AC3.304	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 190 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x250,8mm
	N000.AC3.305	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 190 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x242,7mm
	N000.AC3.306	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 190 STF	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x244,2mm
	N000.AC3.307	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 190 BMT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x238,0mm
	N000.AC3.309	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 190 RZM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x238,7mm
	N000.AC3.310	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 190 SSI	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x239,3mm
	N000.AC3.311	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BACL 4,5 X 190 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x246,7mm
	N000.AD3.301	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 190 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x250,8mm
	N000.AD3.302	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 190 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x247,0mm
	N000.AD3.303	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 190 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x247,0mm

	N000.AD3.304	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 190 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x250,8mm
	N000.AD3.305	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 190 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x242,7mm
	N000.AD3.306	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 190 STF	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x244,2mm
	N000.AD3.307	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 190 BMT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x238,0mm
	N000.AD3.309	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 190 RZM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x238,7mm
	N000.AD3.310	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 190 SSI	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x239,3mm
	N000.AD3.311	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BOCL 4,5 X 190 MLV	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x246,7mm
	N000.AE3.301	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 190 LVT	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø15,55x250,8mm
	N000.AE3.302	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 190 RZK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,95x247,0mm
	N000.AE3.303	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 190 DYP	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x247,0mm
	N000.AE3.304	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 190 STM	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø23,20x250,8mm
	N000.AE3.305	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 190 ATK	- Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); - Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); - Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microarthro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø16,90x242,7mm

	N000.AE3.306	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 190 STF	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø17,40x244,2mm
	N000.AE3.307	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 190 BMT	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø12,00x238,0mm
	N000.AE3.309	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 190 RZM	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 11,45x238,7mm
	N000.AE3.310	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 190 SSJ	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,40x239,3mm
	N000.AE3.311	CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MICROARTRO BRCL 4,5 X 190 MLV	• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911); • Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911); • Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).	A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.	Ø 9,80x246,7mm

3. Legendas da simbologia adotada na rotulagem/embalagem do produto

Os símbolos utilizados são padronizados conforme norma técnico ABNT NBR ISO 15223-1 – Produtos para saúde – Símbolos a serem utilizados em rótulos, rotulagem e informações a serem fornecidas de produtos para saúde, Parte 1: Requisitos gerais. Podendo ser utilizado a simbologia ou a descrição.

	Não reusar
	Não reesterilizar
	Consultar instruções de uso
	Esterilizado por Óxido de Etileno
	Limite de temperatura até 35°C
	Limite de umidade até 85%
	Manter afastado de luz solar ou calor

	Manter seco
	Frágil – manusear com cuidado
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada
	Valido até
	Data de fabricação
	Fabricante

4. Forma de apresentação

A Cânula de Debridação Nutec Microartro é comercializada individualmente na condição de estéril em Óxido de Etileno (ETO), acondicionados unitariamente em embalagem primária tipo blister, selado com papel grau cirúrgico e embalados cartonagem de papel. Na cartonagem e no blister selado é colado rótulo, contendo as informações necessárias para a identificação do produto e são fornecidas etiquetas de rastreabilidade na embalagem.

5. Indicação de uso e finalidade

A Cânula de Debridação Nutec Microartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos, como em alguns procedimentos exemplificados abaixo:

- Exérese de corpos livres;
- Lesões da longa porção do bíceps;
- Artrites e sinovites do ombro,
- Cirurgia da articulação acromioclavicular;
- Lesões do “labrum”;
- Lesões da coifa dos rotadores;
- Ombro congelado,
- Bursoscopia ou endoscopia do espaço subacromial;
- Lesões do manguito rotador;
- Tendinite calcária do ombro;
- Lesões de menisco;
- Lesões de ligamentos;
- Deslocamento da patela;

- Lesões de tendão muscular;
- Síndrome do impacto ulno-carpal;
- Sinovite crônica;
- Lesões condriais por desbridamento;
- Ressecção óssea;
- Desbridamento da articulação do quadril na osteoartrose;
- Desbridamento da artrite séptica e lesões do ligamento da cabeça do fêmur;
- Pequenas articulações (ombro, joelho, quadril, cirurgias endoscópicas e/ou minimamente invasivas da coluna vertebral);
- Outras lesões passíveis de artroscopia;
- ATM;
- Cirurgia de Buco Maxilo;
- Cirurgia de Urologia.
- Cirurgia de otorrinolaringologia.

6. Princípio de funcionamento / Mecanismo de ação

Todos os modelos comerciais da família de Cânula de Debridação Nutec Microartro possuem a função de cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.

7. Modo de uso do produto

Os modelos comerciais da família de Cânula de Debridação Nutec Microartro devem ser utilizados somente para a finalidade específica que foi projetado.

Antes da cirurgia, o cirurgião deve realizar um rigoroso planejamento pré-operatório.

Verificar se a embalagem não está danificada, se a indicação de esterilização está correta e o prazo de validade da esterilização. Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra o blister e retire o produto, em seguida:

- Conecte a Cânula de Debridação à peça de mão e verifique se está compatível ao Shaver;
- Ligue o Shaver;
- Realize o procedimento cirúrgico aplicável;
- Após o procedimento, desligue o Shaver, desconecte a cânula de debridação, inutilize e descarte a cânula de debridação de acordo com as normas hospitalares vigentes.

8. Esterilização

As Cânula de Debridação Nutec Microartro são fornecidas na condição estéril, o método de Esterilização é por Óxido de Etileno (ETO) e prazo de validade de 02 (dois) anos após a data de esterilização.

A esterilização segue os parâmetros e procedimentos estabelecidos no protocolo de validação e na norma ISO 11135 – *Sterilization of health-care products – Ethylene oxide – Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices*. A produção do dispositivo é realizada com grande cuidado, de modo a atender o desempenho pretendido para o produto. Desta forma, a equipe cirúrgica e os demais envolvidos devem manipular os dispositivos adequadamente para que sejam minimizados os riscos de infecção.

9. Reprocessamento

Produto de uso único - PROIBIDO REPROCESSAR.

10. Condições de armazenamento

Os produtos devem ser armazenados em local limpo, arejado e ao abrigo da luz solar direta, em sua embalagem original, em temperatura até 35°C e umidade relativa do ar de no máximo 85%.

Os produtos não podem ser armazenados sobre o chão. Assim recomenda-se a utilização de prateleiras ou paletes, e não deve ser estocado junto com produtos químicos que possam desprender vapores corrosivos. O produto deve ser mantido em suas embalagens originais até o momento de sua utilização, sendo que a abertura da embalagem para utilização cirúrgica e o manuseio do produto deverá ser realizado por pessoal habilitado para este procedimento.

Antes da utilização verificar a data de validade do produto. Não utilizar após o vencimento da data de validade indicada no rótulo do produto.

11. Condições para o transporte

Os produtos devem ser transportados em local limpo, arejado e ao abrigo da luz solar direta, em sua embalagem original, evitar os efeitos de vibração, choques, quedas bruscas durante a movimentação e transporte.

12. Condições de manipulação

- Inspecionar a embalagem e verificar a integridade da mesma, a embalagem deve ser aberta puxando pela aba de abertura na extremidade da embalagem, após, o produto deve ser retirado da embalagem. O manuseio deve seguir técnicas assépticas utilizadas nos centros cirúrgicos.
- Manipule com cuidado;
- O produto somente poderá ser utilizado por pessoal tecnicamente qualificado;
- Verificar a integridade da embalagem primária quanto à existência de qualquer defeito ou violação;
- O usuário deve estar familiarizado com as técnicas de manuseio assépticas e o procedimento cirúrgico a ser realizado, antes da utilização do produto;
- Para manuseio do produto após o uso em cirurgia, seguir os procedimentos legais locais para manuseio de produtos potencialmente contaminantes.

13. Advertências

- A Cânula de Debridação Nutec Microartro deve ser utilizada especificamente para os fins propostos.
- A utilização do produto deve ser realizada apenas por médicos cirurgiões aptos e familiarizados com a técnica cirúrgica.
- Produto de uso único - PROIBIDO REPROCESSAR;
- Não utilize a cânula de debridação que pareça danificada;
- A embalagem não deve estar furada ou rasgada, deve ficar longe de instrumentos cortantes ou pontiagudos;
- Não utilize força excessiva, pois pode resultar em quebra ou fratura da cânula de debridação;
- Não aplique ou exerça força de alavanca nas cânulas de debridação;
- Não toque a área de movimento da cânula de debridação com outros instrumentos, pois, poderá resultar em quebra, fratura ou dano da cânula de debridação ou do equipamento;
- Não utilize o produto fora da data de validade.

14. Precauções

- Produto de uso único - PROIBIDO REPROCESSAR;
- Não utilizar este produto depois da data de validade indicada na etiqueta do produto;
- Manipular cuidadosamente e conforme instruções do fabricante do produto;
- Produto Estéril - Descartar se a embalagem que garante a esterilidade estiver danificada ou aberta.

15. Contraindicações

A Cânula de Debridação não deve ser utilizada para finalidades diferentes das quais foram projetados.

O produto aqui descrito foi desenvolvido para utilização conforme as indicações descritas acima, de modo que quaisquer outras utilizações são consideradas contraindicadas ou sem substrato científico.

16. Efeitos adversos

Não se aplica.

17. Descarte do produto

Produto de uso único - PROIBIDO REPROCESSAR.

O produto foi projetado para ser utilizado em uma única cirurgia, devendo ser descartado logo após sua utilização, em local apropriado para não ocorrer a contaminação de pessoas e nem do meio ambiente.

O descarte deve seguir os regulamentos legais locais para descarte de produtos potencialmente contaminantes (RDC 222 de 2018 - Resíduo Hospitalar).

18. Assistência ao consumidor

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da Nutec Global, envie o produto limpo e embalado em um saco plástico, devidamente identificado com a descrição da não conformidade.

19. Reclamações de clientes

Para maiores informações sobre o produto ou fazer alguma reclamação, entrar em contato com a Nutec Global pelos seguintes canais de atendimento: telefone +55 19 3536-3535, e-mail: sac@nutecglobal.tech; via site: www.nutecglobal.com.br.

Para o envio de produtos para análise, este deve estar limpo e estéril. Devem ser utilizadas embalagens que mantenham a integridade física.

A embalagem e/ou produto deve conter todas as informações necessárias para a identificação do produto médico, relacionadas às condições de manuseio, métodos de limpeza e desinfecção utilizados, bem como descrição e número do lote.

20. Fabricante



NUTEC GLOBAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 07.575.813/0001-59

Avenida 52 A, N°771 - Vila Alemã

Cep: 13.506-563 - Rio Claro - SP

Fone +55 19 3536-3535

www.nutecglobal.com.br

Responsável Técnico: Wellinton Camargo

CREA/SP: 5070992639