

**Nutec Global Indústria e Comércio Ltda – CNPJ: 07.575.813/0001-59**

Avenida 52A, 771 – Vila Alemã – Rio Claro/SP | Responsável Técnico: Wellinton Camargo, CREA/SP: 5070992639

De acordo com a IN nº4/2012 estabelecida pela Anvisa, a Instrução de uso é disponibilizada no site da Nutec Global ([www.nutecglobal.com.br](http://www.nutecglobal.com.br)) e Anvisa, em caso de dúvidas ou para obtenção da instrução de uso em formato impresso (quando necessário) e sem custo adicional entrar em contato através do telefone +55 19 3536-3535 ou pelo e-mail [comercial@nutecglobal.tech](mailto:comercial@nutecglobal.tech).

## Instrução de Uso

### Cânula de Debridação Nutec Macroartro

Registro Anvisa nº 81715689011 – Revisão 00

#### 1. Características do produto

Nome técnico: Cânulas

Nome comercial: Cânula de Debridação Nutec Macroartro

Classe de Risco: II

Produto Estéril – Esterilizado por Óxido de Etileno – ETO

Validade de 02 anos a partir da data de fabricação

O fabricante recomenda uso único e não reesterilizar o produto

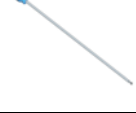
#### 2. Características técnicas

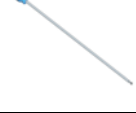
| Imagem Ilustrativa                                                                  | Código       | Descrição                                             | Componentes                                                                                                                                                                                                                                            | Função                                                                                                         | Dimensão       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | N010.AA0.001 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO CMA 5,5 X 150 LVT  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x209,3mm |
|  | N010.AB0.001 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO APC 5,5 X 150 LVT  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x209,3mm |
|  | N010.AC0.001 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BACL 5,5 X 150 LVT | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x210,8mm |

|                                                                                     |              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | N010.AD0.001 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOCL 5,5 X 150 LVT | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x210,8mm |
|    | N010.AE0.001 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRCL 5,5 X 150 LVT | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x210,8mm |
|    | N010.AF0.001 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BASC 5,5 X 150 LVT | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x210,8mm |
|    | N010.AG0.001 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOSC 5,5 X 150 LVT | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x210,8mm |
|    | N010.AH0.001 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRSC 5,5 X 150 LVT | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x210,8mm |
|  | N010.AA1.001 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO CMA 6,5 X 150 LVT  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x209,3mm |
|  | N010.AB1.001 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO APC 6,5 X 150 LVT  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x209,3mm |
|  | N010.AC1.001 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BACL 6,5 X 150 LVT | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x210,8mm |
|  | N010.AD1.001 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOCL 6,5 X 150 LVT | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x210,8mm |
|  | N010.AE1.001 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRCL 6,5 X 150 LVT | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x210,8mm |
|  | N010.AF1.001 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BASC 6,5 X 150 LVT | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x210,8mm |
|  | N010.AG1.001 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOSC 6,5 X 150 LVT | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x210,8mm |

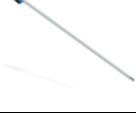
|                                                                                     |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | N010.AH1.001 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRSC 6,5 X 150 LVT  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x210,8mm |
|    | N010.AA0.101 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO CMA 5,5 X 190 LVT   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x249,3mm |
|    | N010.AB0.101 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO APC 5,5 X 190 LVT   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x249,3mm |
|    | N010.AC0.101 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BA CL 5,5 X 190 LVT | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x250,8mm |
|    | N010.AD0.101 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BO CL 5,5 X 190 LVT | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x250,8mm |
|  | N010.AE0.101 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BR CL 5,5 X 190 LVT | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x250,8mm |
|  | N010.AF0.101 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BASC 5,5 X 190 LVT  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x250,8mm |
|  | N010.AG0.101 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOS C 5,5 X 190 LVT | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x250,8mm |
|  | N010.AH0.101 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRSC 5,5 X 190 LVT  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x250,8mm |
|  | N010.AA1.101 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO CMA 6,5 X 190 LVT   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x249,3mm |
|  | N010.AB1.101 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO APC 6,5 X 190 LVT   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x249,3mm |
|  | N010.AC1.101 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BA CL 6,5 X 190 LVT | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x250,8mm |

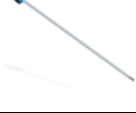
|                                                                                     |              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | N010.AD1.101 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOCL 6,5 X 190 LVT | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x250,8mm |
|    | N010.AE1.101 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRCL 6,5 X 190 LVT | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x250,8mm |
|    | N010.AF1.101 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BASC 6,5 X 190 LVT | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x250,8mm |
|    | N010.AG1.101 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOSC 6,5 X 190 LVT | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x250,8mm |
|    | N010.AG1.101 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRSC 6,5 X 190 LVT | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø15,55x250,8mm |
|  | N010.AA0.002 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO CMA 5,5 X 150 RZK  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x205,5mm |
|  | N010.AB0.002 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO APC 5,5 X 150 RZK  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x205,5mm |
|  | N010.AC0.002 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BACL 5,5 X 150 RZK | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x207,0mm |
|  | N010.AD0.002 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOCL 5,5 X 150 RZK | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x207,0mm |
|  | N010.AE0.002 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRCL 5,5 X 150 RZK | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x207,0mm |
|  | N010.AF0.002 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BASC 5,5 X 150 RZK | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x207,0mm |
|  | N010.AG0.002 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOSC 5,5 X 150 RZK | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x207,0mm |

|                                                                                     |              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | N010.AH0.002 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRSC 5,5 X 150 RZK | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x207,0mm |
|    | N010.AA1.002 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO CMA 6,5 X 150 RZK  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x205,5mm |
|    | N010.AB1.002 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO APC 6,5 X 150 RZK  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x205,5mm |
|    | N010.AC1.002 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BAEL 6,5 X 150 RZK | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x207,0mm |
|    | N010.AD1.002 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOCL 6,5 X 150 RZK | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x207,0mm |
|  | N010.AE1.002 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRCL 6,5 X 150 RZK | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x207,0mm |
|  | N010.AF1.002 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BASC 6,5 X 150 RZK | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x207,0mm |
|  | N010.AG1.002 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOSC 6,5 X 150 RZK | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x207,0mm |
|  | N010.AH1.002 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRSC 6,5 X 150 RZK | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x207,0mm |
|  | N010.AA0.102 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO CMA 5,5 X 190 RZK  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x245,5mm |
|  | N010.AB0.102 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO APC 5,5 X 190 RZK  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x245,5mm |
|  | N010.AC0.102 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BAEL 5,5 X 190 RZK | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x247,0mm |

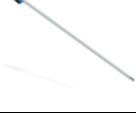
|                                                                                     |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | N010.AD0.102 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOCL 5,5 X 190<br>RZK | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x247,0mm |
|    | N010.AE0.102 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRCL 5,5 X 190 RZK    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x247,0mm |
|    | N010.AF0.102 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BASC 5,5 X 190 RZK    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x247,0mm |
|    | N010.AG0.102 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOSC 5,5 X 190<br>RZK | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x247,0mm |
|    | N010.AH0.102 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRSC 5,5 X 190 RZK    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x247,0mm |
|  | N010.AA1.102 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO CMA 6,5 X 190 RZK     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x245,5mm |
|  | N010.AB1.102 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO APC 6,5 X 190 RZK     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x245,5mm |
|  | N010.AC1.102 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BACL 6,5 X 190 RZK    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x247,0mm |
|  | N010.AD1.102 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOCL 6,5 X 190<br>RZK | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x247,0mm |
|  | N010.AE1.102 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRCL 6,5 X 190 RZK    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x247,0mm |
|  | N010.AF1.102 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BASC 6,5 X 190 RZK    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x247,0mm |
|  | N010.AG1.102 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOSC 6,5 X 190<br>RZK | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x247,0mm |

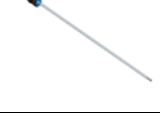


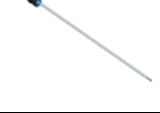
|                                                                                     |              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | N010.AH1.102 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRSC 6,5 X 190 RZK | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,95x247,0mm |
|    | N010.AA0.003 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO CMA 5,5 X 150 DYP  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x205,5mm |
|    | N010.AB0.003 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO APC 5,5 X 150 DYP  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x205,5mm |
|    | N010.AC0.003 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BACL 5,5 X 150 DYP | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x207,0mm |
|    | N010.AD0.003 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOCL 5,5 X 150 DYP | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x207,0mm |
|  | N010.AE0.003 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRCL 5,5 X 150 DYP | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x207,0mm |
|  | N010.AF0.003 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BASC 5,5 X 150 DYP | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x207,0mm |
|  | N010.AG0.003 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOSC 5,5 X 150 DYP | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x207,0mm |
|  | N010.AH0.003 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRSC 5,5 X 150 DYP | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x207,0mm |
|  | N010.AA1.003 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO CMA 6,5 X 150 DYP  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x205,5mm |
|  | N010.AB1.003 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO APC 6,5 X 150 DYP  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x205,5mm |
|  | N010.AC1.003 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BACL 6,5 X 150 DYP | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x207,0mm |

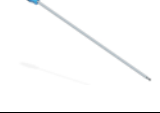
|                                                                                     |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | N010.AD1.003 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOCL 6,5 X 150<br>DYP | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x207,0mm |
|    | N010.AE1.003 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRCL 6,5 X 150 DYP    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x207,0mm |
|    | N010.AF1.003 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BASC 6,5 X 150<br>DYP | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x207,0mm |
|    | N010.AG1.003 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOSC 6,5 X 150<br>DYP | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x207,0mm |
|    | N010.AH1.003 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRSC 6,5 X 150<br>DYP | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x207,0mm |
|  | N010.AA0.103 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO CMA 5,5 X 190 DYP     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x245,5mm |
|  | N010.AB0.103 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO APC 5,5 X 190 DYP     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x245,5mm |
|  | N010.AC0.103 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BACL 5,5 X 190<br>DYP | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x247,0mm |
|  | N010.AD0.103 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOCL 5,5 X 190<br>DYP | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x247,0mm |
|  | N010.AE0.103 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRCL 5,5 X 190 DYP    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x247,0mm |
|  | N010.AF0.103 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BASC 5,5 X 190<br>DYP | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x247,0mm |
|  | N010.AG0.103 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOSC 5,5 X 190<br>DYP | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x247,0mm |



|                                                                                     |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | N010.AH0.103 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRSC 5,5 X 190<br>DYP | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x247,0mm |
|    | N010.AA1.103 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO CMA 6,5 X 190 DYP     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x245,5mm |
|    | N010.AB1.103 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO APC 6,5 X 190 DYP     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x245,5mm |
|    | N010.AC1.103 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BACL 6,5 X 190<br>DYP | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x247,0mm |
|    | N010.AD1.103 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOCL 6,5 X 190<br>DYP | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x247,0mm |
|  | N010.AE1.103 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRCL 6,5 X 190 DYP    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x247,0mm |
|  | N010.AF1.103 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BASC 6,5 X 190<br>DYP | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x247,0mm |
|  | N010.AG1.103 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOSC 6,5 X 190<br>DYP | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x247,0mm |
|  | N010.AH1.103 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRSC 6,5 X 190<br>DYP | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x247,0mm |
|  | N010.AA0.004 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO CMA 5,5 X 150<br>STM  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x209,3mm |
|  | N010.AB0.004 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO APC 5,5 X 150 STM     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x209,3mm |
|  | N010.AC0.004 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BACL 5,5 X 150<br>STM | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x210,8mm |

|                                                                                     |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | N010.AD0.004 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOCL 5,5 X 150<br>STM | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x210,8mm |
|    | N010.AE0.004 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRCL 5,5 X 150<br>STM | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x210,8mm |
|    | N010.AF0.004 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BASC 5,5 X 150<br>STM | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x210,8mm |
|    | N010.AG0.004 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOSC 5,5 X 150<br>STM | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x210,8mm |
|    | N010.AH0.004 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRSC 5,5 X 150<br>STM | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x210,8mm |
|  | N010.AA1.004 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO CMA 6,5 X 150<br>STM  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x209,3mm |
|  | N010.AB1.004 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO APC 6,5 X 150 STM     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x209,3mm |
|  | N010.AC1.004 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BACL 6,5 X 150<br>STM | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x210,8mm |
|  | N010.AD1.004 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOCL 6,5 X 150<br>STM | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x210,8mm |
|  | N010.AE1.004 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRCL 6,5 X 150<br>STM | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x210,8mm |
|  | N010.AF1.004 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BASC 6,5 X 150<br>STM | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x210,8mm |
|  | N010.AG1.004 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOSC 6,5 X 150<br>STM | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x210,8mm |

|                                                                                     |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | N010.AH1.004 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRSC 6,5 X 150<br>STM | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x210,8mm |
|    | N010.AA0.104 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO CMA 5,5 X 190<br>STM  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x249,3mm |
|    | N010.AB0.104 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO APC 5,5 X 190 STM     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x249,3mm |
|    | N010.AC0.104 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BACL 5,5 X 190<br>STM | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x250,8mm |
|    | N010.AD0.104 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOCL 5,5 X 190<br>STM | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x250,8mm |
|  | N010.AE0.104 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRCL 5,5 X 190<br>STM | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x250,8mm |
|  | N010.AF0.104 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BASC 5,5 X 190<br>STM | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x250,8mm |
|  | N010.AG0.104 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOSC 5,5 X 190<br>STM | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x250,8mm |
|  | N010.AH0.104 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRSC 5,5 X 190<br>STM | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x250,8mm |
|  | N010.AA1.104 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO CMA 6,5 X 190<br>STM  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x249,3mm |
|  | N010.AB1.104 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO APC 6,5 X 190 STM     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x249,3mm |
|  | N010.AC1.104 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BACL 6,5 X 190<br>STM | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x250,8mm |

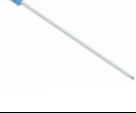
|                                                                                     |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | N010.AD1.104 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOCL 6,5 X 190<br>STM  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x250,8mm |
|    | N010.AE1.104 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRCL 6,5 X 190<br>STM  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x250,8mm |
|    | N010.AF1.104 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BASC 6,5 X 190<br>STM  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x250,8mm |
|    | N010.AG1.104 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOSCL 6,5 X 190<br>STM | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x250,8mm |
|    | N010.AH1.104 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRSC 6,5 X 190<br>STM  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø23,20x250,8mm |
|  | N010.AA0.005 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO CMA 5,5 X 150 ATK      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x201,2mm |
|  | N010.AB0.005 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO APC 5,5 X 150 ATK      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x201,2mm |
|  | N010.AC0.005 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BACL 5,5 X 150 ATK     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x202,7mm |
|  | N010.AD0.005 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOCL 5,5 X 150<br>ATK  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x202,7mm |
|  | N010.AE0.005 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRCL 5,5 X 150 ATK     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x202,7mm |
|  | N010.AF0.005 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BASC 5,5 X 150<br>ATK  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x202,7mm |
|  | N010.AG0.005 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOSCL 5,5 X 150<br>ATK | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x202,7mm |

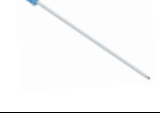
|                                                                                     |              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | N010.AH0.005 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRSC 5,5 X 150 ATK | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x202,7mm |
|    | N010.AA1.005 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO CMA 6,5 X 150 ATK  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x201,2mm |
|    | N010.AB1.005 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO APC 6,5 X 150 ATK  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x201,2mm |
|    | N010.AC1.005 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BAEL 6,5 X 150 ATK | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x202,7mm |
|    | N010.AD1.005 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOCL 6,5 X 150 ATK | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x202,7mm |
|  | N010.AE1.005 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRCL 6,5 X 150 ATK | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x202,7mm |
|  | N010.AF1.005 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BASC 6,5 X 150 ATK | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x202,7mm |
|  | N010.AG1.005 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOSC 6,5 X 150 ATK | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x202,7mm |
|  | N010.AH1.005 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRSC 6,5 X 150 ATK | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x202,7mm |
|  | N010.AA0.105 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO CMA 5,5 X 190 ATK  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x241,2mm |
|  | N010.AB0.105 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO APC 5,5 X 190 ATK  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x241,2mm |
|  | N010.AC0.105 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BAEL 5,5 X 190 ATK | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x242,7mm |

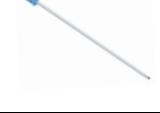


|                                                                                     |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | N010.AD0.105 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOCL 5,5 X 190<br>ATK | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x242,7mm |
|    | N010.AE0.105 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRCL 5,5 X 190 ATK    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x242,7mm |
|    | N010.AF0.105 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BASC 5,5 X 190<br>ATK | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x242,7mm |
|    | N010.AG0.105 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOSC 5,5 X 190<br>ATK | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x242,7mm |
|    | N010.AH0.105 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRSC 5,5 X 190 ATK    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x242,7mm |
|  | N010.AA1.105 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO CMA 6,5 X 190 ATK     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x241,2mm |
|  | N010.AB1.105 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO APC 6,5 X 190 ATK     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x241,2mm |
|  | N010.AC1.105 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BACL 6,5 X 190 ATK    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x242,7mm |
|  | N010.AD1.105 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOCL 6,5 X 190<br>ATK | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x242,7mm |
|  | N010.AE1.105 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRCL 6,5 X 190 ATK    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x242,7mm |
|  | N010.AF1.105 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BASC 6,5 X 190<br>ATK | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x242,7mm |
|  | N010.AG1.105 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOSC 6,5 X 190<br>ATK | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x242,7mm |



|                                                                                     |              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | N010.AH1.105 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRSC 5,5 X 190 ATK | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø16,90x242,7mm |
|    | N010.AA0.006 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO CMA 5,5 X 150 STF  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x202,7mm |
|    | N010.AB0.006 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO APC 5,5 X 150 STF  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x202,7mm |
|    | N010.AC0.006 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BACL 5,5 X 150 STF | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x204,2mm |
|    | N010.AD0.006 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOCL 5,5 X 150 STF | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x204,2mm |
|  | N010.AE0.006 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRCL 5,5 X 150 STF | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x204,2mm |
|  | N010.AF0.006 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BASC 5,5 X 150 STF | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x204,2mm |
|  | N010.AG0.006 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOSC 5,5 X 150 STF | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x204,2mm |
|  | N010.AH0.006 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRSC 5,5 X 150 STF | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x204,2mm |
|  | N010.AA1.006 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO CMA 6,5 X 150 STF  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x202,7mm |
|  | N010.AB1.006 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO APC 6,5 X 150 STF  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x202,7mm |
|  | N010.AC1.006 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BACL 6,5 X 150 STF | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x204,2mm |

|                                                                                     |              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | N010.AD1.006 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOCL 6,5 X 150 STF | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x204,2mm |
|    | N010.AE1.006 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRCL 6,5 X 150 STF | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x204,2mm |
|    | N010.AF1.006 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BASC 6,5 X 150 STF | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x204,2mm |
|    | N010.AG1.006 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOSC 6,5 X 150 STF | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x204,2mm |
|    | N010.AH1.006 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRSC 6,5 X 150 STF | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x204,2mm |
|  | N010.AA0.106 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO CMA 5,5 X 190 STF  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x242,7mm |
|  | N010.AB0.106 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO APC 5,5 X 190 STF  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x242,7mm |
|  | N010.AC0.106 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BACL 5,5 X 190 STF | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x244,2mm |
|  | N010.AD0.106 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOCL 5,5 X 190 STF | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x244,2mm |
|  | N010.AE0.106 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRCL 5,5 X 190 STF | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x244,2mm |
|  | N010.AF0.106 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BASC 5,5 X 190 STF | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x244,2mm |
|  | N010.AG0.106 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOSC 5,5 X 190 STF | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x244,2mm |

|                                                                                     |              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | N010.AH0.106 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRSC 5,5 X 190 STF | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x244,2mm |
|    | N010.AA1.106 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO CMA 6,5 X 190 STF  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x242,7mm |
|    | N010.AB1.106 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO APC 6,5 X 190 STF  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x242,7mm |
|    | N010.AC1.106 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BACL 6,5 X 190 STF | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x244,2mm |
|    | N010.AD1.106 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOCL 6,5 X 190 STF | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x244,2mm |
|  | N010.AE1.106 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRCL 6,5 X 190 STF | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x244,2mm |
|  | N010.AF1.106 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BASC 6,5 X 190 STF | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x244,2mm |
|  | N010.AG1.106 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOSC 6,5 X 190 STF | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x244,2mm |
|  | N010.AH1.106 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRSC 6,5 X 190 STF | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø17,40x244,2mm |
|  | N010.AA0.007 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO CMA 5,5 X 150 BMT  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x196,5mm |
|  | N010.AB0.007 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO APC 5,5 X 150 BMT  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x196,5mm |
|  | N010.AC0.007 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BACL 5,5 X 150 BMT | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x198,0mm |

|                                                                                     |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | N010.AD0.007 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOCL 5,5 X 150<br>BMT | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x198,0mm |
|    | N010.AE0.007 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRCL 5,5 X 150<br>BMT | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x198,0mm |
|    | N010.AF0.007 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BASC 5,5 X 150<br>BMT | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x198,0mm |
|    | N010.AG0.007 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOSC 5,5 X 150<br>BMT | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x198,0mm |
|   | N010.AH0.007 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRSC 5,5 X 150<br>BMT | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x198,0mm |
|  | N010.AA1.007 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO CMA 6,5 X 150<br>BMT  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x196,5mm |
|  | N010.AB1.007 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO APC 6,5 X 150 BMT     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x196,5mm |
|  | N010.AC1.007 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BACL 6,5 X 150<br>BMT | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x198,0mm |
|  | N010.AD1.007 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOCL 6,5 X 150<br>BMT | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x198,0mm |
|  | N010.AE1.007 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRCL 6,5 X 150<br>BMT | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x198,0mm |
|  | N010.AF1.007 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BASC 6,5 X 150<br>BMT | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x198,0mm |
|  | N010.AG1.007 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOSC 6,5 X 150<br>BMT | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x198,0mm |

|                                                                                     |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | N010.AH1.007 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRSC 6,5 X 150<br>BMT | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x198,0mm |
|    | N010.AA0.107 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO CMA 5,5 X 190<br>BMT  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x236,5mm |
|    | N010.AB0.107 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO APC 5,5 X 190 BMT     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x236,5mm |
|    | N010.AC0.107 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BACL 5,5 X 190<br>BMT | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x238,0mm |
|   | N010.AD0.107 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOCL 5,5 X 190<br>BMT | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x238,0mm |
|  | N010.AE0.107 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRCL 5,5 X 190<br>BMT | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x238,0mm |
|  | N010.AF0.107 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BASC 5,5 X 190<br>BMT | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x238,0mm |
|  | N010.AG0.107 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOSC 5,5 X 190<br>BMT | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x238,0mm |
|  | N010.AH0.107 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRSC 5,5 X 190<br>BMT | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x238,0mm |
|  | N010.AA1.107 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO CMA 6,5 X 190<br>BMT  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x236,5mm |
|  | N010.AB1.107 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO APC 6,5 X 190 BMT     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x236,5mm |
|  | N010.AC1.107 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BACL 6,5 X 190<br>BMT | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x238,0mm |



|                                                                                    |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|   | N010.AD1.107 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOCL 6,5 X 190<br>BMT | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x238,0mm |
|   | N010.AE1.107 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRCL 6,5 X 190<br>BMT | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x238,0mm |
|   | N010.AF1.107 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BASC 6,5 X 190<br>BMT | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x238,0mm |
|   | N010.AG1.107 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BOSC 6,5 X 190<br>BMT | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x238,0mm |
|  | N010.AH1.107 | CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>MACROARTRO BRSC 6,5 X 190<br>BMT | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponta cortante em Aço Inoxidável 420A (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Tubo em Aço Inoxidável 304 (ABNT NBR 13911);</li> <li>• Encaixes em Alumínio série 6000 (ABNT ISO 209) e Poliacetal (ABNT NBR 15804).</li> </ul> | A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos. | Ø12,00x238,0mm |

### 3. Legendas da simbologia adotada na rotulagem/embalagem do produto

Os símbolos utilizados são padronizados conforme norma técnico ABNT NBR ISO 15223-1 – Produtos para saúde – Símbolos a serem utilizados em rótulos, rotulagem e informações a serem fornecidas de produtos para saúde, Parte 1: Requisitos gerais. Podendo ser utilizado a simbologia ou a descrição.

|                                                                                     |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Não reusar                            |
|  | Não reesterilizar                     |
|  | Consultar instruções de uso           |
|  | Esterilizado por Óxido de Etileno     |
|  | Limite de temperatura até 35°C        |
|  | Limite de umidade até 85%             |
|  | Manter afastado de luz solar ou calor |

|                                                                                   |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Manter seco                                    |
|  | Frágil – manusear com cuidado                  |
|  | Não utilizar se a embalagem estiver danificada |
|  | Valido até                                     |
|  | Data de fabricação                             |
|  | Fabricante                                     |

#### 4. Forma de apresentação

A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é comercializada individualmente na condição de estéril em Óxido de Etileno (ETO), acondicionados unitariamente em embalagem primária tipo blister, selado com papel grau cirúrgico e embalados cartonagem de papel. Na cartonagem e no blister selado é colado rótulo, contendo as informações necessárias para a identificação do produto e são fornecidas etiquetas de rastreabilidade na embalagem.

#### 5. Indicação de uso e finalidade

A Cânula de Debridação Nutec Macroartro é indicada para cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos, como em alguns procedimentos exemplificados abaixo:

- Exérese de corpos livres;
- Lesões da longa porção do bíceps;
- Artrites e sinovites do ombro,
- Cirurgia da articulação acromioclavicular;
- Lesões do “labrum”;
- Lesões da coifa dos rotadores;
- Ombro congelado,
- Bursoscopia ou endoscopia do espaço subacromial;
- Lesões do manguito rotador;
- Tendinite calcária do ombro;
- Lesões de menisco;
- Lesões de ligamentos;
- Deslocamento da patela;

- Lesões de tendão muscular;
- Síndrome do impacto ulno-carpal;
- Sinovite crônica;
- Lesões condriais por desbridamento;
- Ressecção óssea;
- Desbridamento da articulação do quadril na osteoartrose;
- Desbridamento da artrite séptica e lesões do ligamento da cabeça do fêmur;
- Pequenas articulações (ombro, joelho, quadril, cirurgias endoscópicas e/ou minimamente invasivas da coluna vertebral);
- Outras lesões passíveis de artroscopia;
- Cirurgia de Urologia.

## **6. Princípio de funcionamento / Mecanismo de ação**

Todos os modelos comerciais da família de Cânula de Debridação Nutec Macroartro possuem a função de cortar, raspar, moer, furar e remover ossos e tecidos.

## **7. Modo de uso do produto**

Os modelos comerciais da família de Cânula de Debridação Nutec Macroartro devem ser utilizados somente para a finalidade específica que foi projetado.

Antes da cirurgia, o cirurgião deve realizar um rigoroso planejamento pré-operatório.

Verificar se a embalagem não está danificada, se a indicação de esterilização está correta e o prazo de validade da esterilização. Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra o blister e retire o produto, em seguida:

- Conecte a Cânula de Debridação à peça de mão e verifique se está compatível ao Shaver;
- Ligue o Shaver;
- Realize o procedimento cirúrgico aplicável;
- Após o procedimento, desligue o Shaver, desconecte a cânula de debridação, inutilize e descarte a cânula de debridação de acordo com as normas hospitalares vigentes.

## **8. Esterilização**

As Cânula de Debridação Nutec Macroartro são fornecidas na condição estéril, o método de Esterilização é por Óxido de Etileno (ETO) e prazo de validade de 02 (dois) anos após a data de esterilização.

A esterilização segue os parâmetros e procedimentos estabelecidos no protocolo de validação e na norma ISO 11135 – *Sterilization of health-care products – Ethylene oxide – Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices*. A produção do dispositivo é realizada com grande cuidado, de

modo a atender o desempenho pretendido para o produto. Desta forma, a equipe cirúrgica e os demais envolvidos devem manipular os dispositivos adequadamente para que sejam minimizados os riscos de infecção.

## **9. Reprocessamento**

O fabricante recomenda uso único e não reesterilizar o produto

## **10. Condições de armazenamento**

Os produtos devem ser armazenados em local limpo, arejado e ao abrigo da luz solar direta, em sua embalagem original, em temperatura até 35°C e umidade relativa do ar de no máximo 85%.

Os produtos não podem ser armazenados sobre o chão. Assim recomenda-se a utilização de prateleiras ou paletes, e não deve ser estocado junto com produtos químicos que possam desprender vapores corrosivos. O produto deve ser mantido em suas embalagens originais até o momento de sua utilização, sendo que a abertura da embalagem para utilização cirúrgica e o manuseio do produto deverá ser realizado por pessoal habilitado para este procedimento.

Antes da utilização verificar a data de validade do produto. Não utilizar após o vencimento da data de validade indicada no rótulo do produto.

## **11. Condições para o transporte**

Os produtos devem ser transportados em local limpo, arejado e ao abrigo da luz solar direta, em sua embalagem original, evitar os efeitos de vibração, choques, quedas bruscas durante a movimentação e transporte.

## **12. Condições de manipulação**

- Inspeccionar a embalagem e verificar a integridade da mesma, a embalagem deve ser aberta puxando pela aba de abertura na extremidade da embalagem, após, o produto deve ser retirado da embalagem. O manuseio deve seguir técnicas assépticas utilizadas nos centros cirúrgicos.
- Manipule com cuidado;
- O produto somente poderá ser utilizado por pessoal tecnicamente qualificado;
- Verificar a integridade da embalagem primária quanto à existência de qualquer defeito ou violação;
- O usuário deve estar familiarizado com as técnicas de manuseio assépticas e o procedimento cirúrgico a ser realizado, antes da utilização do produto;
- Para manuseio do produto após o uso em cirurgia, seguir os procedimentos legais locais para manuseio de produtos potencialmente contaminantes.

## **13. Advertências**

- A Câmula de Debridação Nutec Macroartro deve ser utilizada especificamente para os fins propostos.

- A utilização do produto deve ser realizada apenas por médicos cirurgiões aptos e familiarizados com a técnica cirúrgica.
- O fabricante recomenda uso único e não reesterilizar o produto;
- Não utilize a cânula de debridação que pareça danificada;
- A embalagem não deve estar furada ou rasgada, deve ficar longe de instrumentos cortantes ou pontiagudos;
- Não utilize força excessiva, pois pode resultar em quebra ou fratura da cânula de debridação;
- Não aplique ou exerça força de alavanca nas cânulas de debridação;
- Não toque a área de movimento da cânula de debridação com outros instrumentos, pois, poderá resultar em quebra, fratura ou dano da cânula de debridação ou do equipamento;
- Não utilize o produto fora da data de validade.

#### **14. Precauções**

- O fabricante recomenda uso único e não reesterilizar o produto;
- Não utilizar este produto depois da data de validade indicada na etiqueta do produto;
- Manipular cuidadosamente e conforme instruções do fabricante do produto;
- Produto Estéril - Descartar se a embalagem que garante a esterilidade estiver danificada ou aberta.

#### **15. Contraindicações**

A Cânula de Debridação não deve ser utilizada para finalidades diferentes das quais foram projetados.

O produto aqui descrito foi desenvolvido para utilização conforme as indicações descritas acima, de modo que quaisquer outras utilizações são consideradas contraindicadas ou sem substrato científico.

#### **16. Efeitos adversos**

Não se aplica.

#### **17. Descarte do produto**

O fabricante recomenda uso único e não reesterilizar o produto.

O produto foi projetado para ser utilizado em uma única cirurgia, devendo ser descartado logo após sua utilização, em local apropriado para não ocorrer a contaminação de pessoas e nem do meio ambiente.

O descarte deve seguir os regulamentos legais locais para descarte de produtos potencialmente contaminantes (RDC 222 de 2018 - Resíduo Hospitalar).

#### **18. Assistência ao consumidor**



Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da Nutec Global, envie o produto limpo e embalado em um saco plástico, devidamente identificado com a descrição da não conformidade.

## **19. Reclamações de clientes**

Para maiores informações sobre o produto ou fazer alguma reclamação, entrar em contato com a Nutec Global pelos seguintes canais de atendimento: telefone +55 19 3536-3535, e-mail: [sac@nutecglobal.tech](mailto:sac@nutecglobal.tech); via site: [www.nutecglobal.com.br](http://www.nutecglobal.com.br).

Para o envio de produtos para análise, este deve estar limpo e estéril. Devem ser utilizadas embalagens que mantenham a integridade física.

A embalagem e/ou produto deve conter todas as informações necessárias para a identificação do produto médico, relacionadas às condições de manuseio, métodos de limpeza e desinfecção utilizados, bem como descrição e número do lote.

## **20. Fabricante**



NUTEC GLOBAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 07.575.813/0001-59

Avenida 52 A, N°771 - Vila Alemã

Cep: 13.506-563 - Rio Claro - SP

Fone +55 19 3536-3535

[www.nutecglobal.com.br](http://www.nutecglobal.com.br)

Responsável Técnico: Wellinton Camargo

CREA/SP: 5070992639